

INSTRUÇÕES DE USO

Produto:

Fio de Nylon sem Agulha

Versão:

002

Fabricante:

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.

Distribuidor Nacional:

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.

DESCRIÇÃO

Os fios de Nylon sem agulha são feitos com fio polimérico sintético, composto de Poliamida 6.6. O fio de Nylon é monofilamentar, não absorvível e pode ser tingido de preto ou não tingido (incolor).

INDICAÇÕES

Os fios de Nylon sem agulha são indicados para a aproximação de incisões cirúrgicas, auxiliando o processo de cicatrização dos tecidos. Indicados para procedimentos cuticular (fechamento de pele), fechamento geral, obstetrícia e ginecologia, vascular, microcirurgia, plástica, odontologia, oftalmologia e para a fixação de campos de diversas especialidades, sempre observando as diferenças técnicas, atuando em procedimentos pouco invasivos e de baixo tempo de permanência. O tempo de permanência do fio do nylon será de até 30 dias.

CONTRAINDICAÇÕES

O fio de Nylon sem agulha é contraindicado para uso no sistema nervoso central e no sistema circulatório central.

PRECAUÇÕES E ORIENTAÇÕES ADEQUADAS PARA USO CORRETO E SEGURO DO PRODUTO

É recomendado que ao manusear este ou qualquer outro material, tome-se o cuidado para evitar danos de manuseio.

Evitar amassar ou enrugar o produto.

Recomenda-se que medidas cautelares sejam tomadas e que a embalagem seja aberta de modo asséptico imediatamente antes do uso, minimizando a possibilidade de contaminação.

Não utilizar o produto se a data de validade estiver vencida.

A embalagem garante a esterilidade do produto, desde que não aberta ou danificada.

A embalagem não devem ser autoclavadas.

Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada;

Uso exclusivo de profissionais de saúde;

O produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um dispositivo médico de uso único.

Adote procedimentos de descarte levando em conta o risco de contaminação.

Descarte corretamente os materiais não usados e as embalagens abertas.

Produto não fervível;

‘Não reutilizar.’

“Não reesterilizar.”

“Produto para saúde de uso único.”

“Proibido reprocessar.”

“Produto estéril.”

INSTRUÇÕES DE USO

Utilizar os fios de Nylon sem agulha de tamanhos e diâmetros adequados e de acordo com o procedimento cirúrgico pretendido.

O profissional da saúde que irá realizar o procedimento deve decidir, com base em sua experiência e conhecimento, o modelo apropriado a ser utilizado após avaliar as condições do paciente e técnica cirúrgica a ser aplicada.

O uso deste produto deve estar de acordo com os procedimentos cirúrgicos aplicáveis e indicados para fios cirúrgicos não absorvíveis, considerando a área de aplicação.

Quando aplicável, escolha um porta-agulhas correto para utilização na agulha, um produto de qualidade e com um design adequado.

Não esmague ou deforme o fio utilizando instrumentos aplicáveis.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Os fios são acondicionados individualmente em rótulos e posteriormente em envelopes de papel grau cirúrgico de polietileno denominado de embalagem primária, para depois serem acondicionados em caixa de papelão com 01 até 120 envelopes.

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Transportar e conservar o produto em temperatura ambiente (30 +/- 2), umidade relativa em torno de 60%, em lugares secos e protegidos da luz solar.

VALIDADE

Validade de 5 anos a partir da data de fabricação, desde que mantida a integridade da embalagem.

ESTERILIZAÇÃO

Produto estéril.

Esterilizado por Óxido de etileno (ETO).

FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:

BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA

CNPJ: 37.844.479/0001-52

Avenida Maranhão, nº 500, Bairro Jundiáí, CEP: 75.110-470

Anápolis - Goiás - Brasil

Tel.: 55 (62) 3324-2120, 3703-2200

Fax: 55 (62) 3324-3072, 3703-2224/2225

Site: www.biolinefios.com.br

E-mail: sac@biolinefios.com.br

Indústria Brasileira

R.T / T.R: Alexandre Faria Vasconcelos - CRQ XII – 12200147.