

INSTRUÇÕES DE USO

Produto:

Fio de Poliéster sem Agulha

Versão:

002

Fabricante:

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.

Distribuidor Nacional:

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.

DESCRIÇÃO

Os fios de Poliéster sem agulha são fios sintéticos, não absorvíveis, multifilamentar do Polímero Tereftalato de Etileno, cujas fibras são trançadas e revestidas com silicone, disponíveis nas cores verde e branca.

INDICAÇÕES

Os Fios de Poliéster sem Agulha são indicados na aproximação de incisões cirúrgicas contribuindo com o processo de cicatrização dos tecidos. Indicado para procedimentos cardiovasculares, ortopedia, laparoscopia, oftalmologia e na fixação de campos em diversas especialidades, observando as diferenças técnicas.

CONTRAINDICAÇÕES

Não é recomendado para procedimentos que se espera absorção do fio, por se tratar de um fio sintético não absorvível

PRECAUÇÕES E ORIENTAÇÕES ADEQUADAS PARA USO CORRETO E SEGURO DO PRODUTO

É recomendado que ao manusear este ou qualquer outro material, tome-se o cuidado para evitar danos de manuseio.

Evitar amassar ou enrugar o produto.

Recomenda-se que medidas cautelares sejam tomadas e que a embalagem seja aberta de modo asséptico imediatamente antes do uso, minimizando a possibilidade de contaminação.

Não utilizar o produto se a data de validade estiver vencida.

A embalagem garante a esterilidade do produto, desde que não aberta ou danificada.

A embalagem não devem ser autoclavadas.

Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada;

Uso exclusivo de profissionais de saúde;

O produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um dispositivo médico de uso único.

Adote procedimentos de descarte levando em conta o risco de contaminação.

Descarte corretamente os materiais não usados e as embalagens abertas.

Produto não fervível;

‘Não reutilizar.’

“Não reesterilizar.”

“Produto para saúde de uso único.”

“Proibido reprocessar.”

“Produto estéril.”

INSTRUÇÕES DE USO

Utilizar os fios de Poliéster sem Agulha de tamanhos e diâmetros adequados e de acordo com o procedimento cirúrgico pretendido.

O profissional da saúde que irá realizar o procedimento deve decidir, com base em sua experiência e conhecimento, o modelo apropriado a ser utilizado após avaliar as condições do paciente e técnica cirúrgica a ser aplicada.

O uso deste produto deve estar de acordo com os procedimentos cirúrgicos aplicáveis e indicados para fios não absorvíveis, considerando a área de aplicação.

Quando aplicável, escolha um porta-agulhas correto para utilização na agulha, um produto de qualidade e com um design adequado.

Não esmague ou deforme o fio utilizando instrumentos aplicáveis.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Os Fios de Poliéster sem Agulha estão disponíveis nas cores branca e verde em envelopes grau cirúrgico, acondicionados em caixas de papel cartão, contendo de 1 a 120 unidades por caixa.

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

É recomendado que se armazene e transporte os fios Bioline em sua embalagem, livre da luz solar direta e de umidade.

VALIDADE

Validade de 5 anos a partir da data de fabricação, desde que mantida a integridade da embalagem.

ESTERILIZAÇÃO

Produto estéril.

Esterilizado por Óxido de etileno (ETO).

FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:

BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA

CNPJ: 37.844.479/0001-52

Avenida Maranhão, nº 500, Bairro Jundiaí, CEP: 75.110-470

Anápolis - Goiás - Brasil

Tel.: 55 (62) 3324-2120, 3703-2200

Fax: 55 (62) 3324-3072, 3703-2224/2225

Site: www.biolinefios.com.br

E-mail: sac@biolinefios.com.br

Indústria Brasileira

R.T / T.R: Alexandre Faria Vasconcelos - CRQ XII – 12200147.