

INSTRUÇÕES DE USO

Produto:

Fios de Algodão com Poliéster sem Agulha

Versão:

003

Fabricante:

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.

Distribuidor Nacional:

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.

DESCRIÇÃO

Os fios de Algodão com Poliéster sem agulha são fios de origem mista, fabricados com fio não absorvível multifilamentar de algodão (39%) obtidas da planta *Gossypium sp*, e fibras de poliéster (61%), as quais são reunidas e torcidas.

INDICAÇÕES

Os fios de Algodão com Poliéster sem agulha são indicados na aproximação de incisões cirúrgicas auxiliando o processo de cicatrização dos tecidos. Indicado para procedimentos cuticular (fechamento de pele), aparelho digestivo e na fixação de campos de diversas especialidades, sempre observando as diferenças técnicas.

CONTRAINDICAÇÕES

Não é recomendado para procedimentos que se espera absorção do fio, por se tratar de um fio sintético não absorvível.

PRECAUÇÕES E ORIENTAÇÕES ADEQUADAS PARA USO CORRETO E SEGURO DO PRODUTO

É recomendado que ao manusear este ou qualquer outro material de sutura, tome-se o cuidado para evitar danos de manuseio.

Evitar amassar ou enrugar o produto.

Recomenda-se que medidas cautelares sejam tomadas e que a embalagem seja aberta de modo asséptico imediatamente antes do uso, minimizando a possibilidade de contaminação.

Não utilizar o produto se a data de validade estiver vencida.

A embalagem garante a esterilidade do produto, desde que não aberta ou danificada.

A embalagem não devem ser autoclavadas.

Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada;

Uso exclusivo de profissionais de saúde;

O produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um dispositivo médico de uso único.

Adote procedimentos de descarte levando em conta o risco de contaminação.

Descarte corretamente os materiais não usados e as embalagens abertas.

Produto não fervível;

‘Não reutilizar.’

“Não reesterilizar.”

“Produto para saúde de uso único.”

INSTRUÇÕES DE USO

Utilizar os fios de Algodão com Poliéster de tamanhos e diâmetros adequados e de acordo com o procedimento cirúrgico pretendido.

O profissional da saúde que irá realizar o procedimento deve decidir, com base em sua experiência e conhecimento, o modelo de sutura apropriado a ser utilizado após avaliar as condições do paciente e técnica cirúrgica a ser aplicada.

O uso deste produto deve estar de acordo com os procedimentos cirúrgicos aplicáveis e indicados para fios não absorvíveis, considerando a área de aplicação.

Não esmague ou deforme o fio de sutura utilizando instrumentos aplicáveis.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

A sutura cirúrgica de Algodão com Poliéster está disponível na seguinte apresentação:

Cartuchos contendo 12 ou 24 unidades de acordo com o produto.

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Armazenar o produto a uma temperatura em torno de 30°C variação de mais ou menos 2°C, com umidade em torno de 60% e ao abrigo da luz direta.

VALIDADE

Validade de 5 anos a partir da data de fabricação, desde que mantida a integridade da embalagem.

ESTERILIZAÇÃO

Produto estéril.

Esterilizado por Óxido de etileno (ETO).

FABRICADO E DISTRIBUIDOS POR:

BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA

CNPJ: 37.844.479/0001-52

Avenida Maranhão, nº 500, Bairro Jundiaí, CEP: 75.110-470

Anápolis - Goiás - Brasil

Tel.: 55 (62) 3324-2120, 3703-2200

Fax: 55 (62) 3324-3072, 3703-2224/2225

Site: www.biolinefios.com.br

E-mail: sac@biolinefios.com.br

Indústria Brasileira

R.T / T.R: Alexandre Faria Vasconcelos - CRQ XII - 12200147